



Breezy Relax
Quickie Relax

Introducción (1.1.1)

Estimado cliente:

Nos complace que haya se haya decidido por uno de los productos de SUNRISE MEDICAL. Este manual del usuario le proporcionará muchos consejos e ideas para obtener el mejor rendimiento de su silla de ruedas.

Mantener **LAZOS ESTRECHOS** con nuestros clientes es muy importante para Sunrise Medical. Por eso, nos gusta mantenerle al día con noticias de las últimas novedades que se van produciendo en nuestra empresa. Unos lazos estrechos con nuestro cliente aportan además la ventaja añadida de una asistencia rápida cuando necesite piezas de repuesto o accesorios, o si simplemente tiene alguna pregunta sobre su silla de ruedas; todo ello con el mínimo de papeleo posible. Queremos que esté usted satisfecho con nuestros productos y nuestra asistencia. Por eso, Sunrise Medical trabaja sin descanso para mejorar continuamente sus productos. Precisamente por esto, pueden producirse cambios en nuestra cartera de productos en cuanto a su forma, tecnología y gama, y, por consiguiente, no podemos aceptar reclamaciones derivadas de los datos o imágenes contenidas en este manual del usuario.

En SUNRISE MEDICAL se nos ha concedido la certificación ISO-9001, que confirma la calidad de nuestros productos en todas sus etapas, desde la investigación y el desarrollo hasta la producción. Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor autorizado de SUNRISE MEDICAL si tiene alguna pregunta relativa al uso, el mantenimiento o la seguridad de su silla de ruedas. Si no existe un distribuidor autorizado en su zona, o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros por escrito o por teléfono:

Sunrise Medical SL
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya
España
Tel. +34-902-142434
Fax +34-94-648-1575
www.sunrisemedical.com

Índice

Prólogo sobre sillas de ruedas	
Consejos de seguridad	4
Visión de conjunto	5
Manejo	6
Opciones	
Tubos de cola	6
Frenos	6
Frenos de tambor	6
Reposapiés y enclavador	6
Reposapiés estándar elevable	7
Plataformas de ángulo ajustable	7
Reposacabezas	7
Ajuste de la altura del asiento	7
Ampliación de la distancia entre ejes	8
Altura ajustable del respaldo	8
Respaldo Comfort	8
Almohadillas laterales	8
Ángulo ajustable del respaldo	8
Reposabrazos altura ajustable	8
Hemiplejía	8
Asas de empuje	9
Cinturón de seguridad	9
Tubos anti-vuelco	9
Asiento Comfort	9
Soporte de bastones	9
Mesa de terapia	9
Neumáticos y montaje	10
Solución de problemas	10
Cuidado y mantenimiento	10
Sujeción de tornillos	10
Amortiguadores y cables	11
Especificaciones técnicas	11
Etiqueta / Garantía	11
Presión	12

Este manual provee información de todas las posibilidades de la silla, que se vende en diferentes países, sin especificar cuales de ellas están disponibles en cada país, o si son standard u opcionales.

Consejos de seguridad (3.1.1)

El diseño y la construcción de esta silla de ruedas han sido realizados de forma que se garantice la máxima seguridad, cumpliendo sobradamente todas normas internacionales de seguridad vigentes. Sin embargo, es posible que los usuarios se pongan en peligro mediante un uso indebido de sus sillas de ruedas. Por su propia seguridad, es absolutamente esencial que se obedezcan las reglas siguientes. Las adaptaciones o ajustes erróneos o poco profesionales podrían aumentar el riesgo de accidentes.

Como usuario de una silla de ruedas, es usted parte del tráfico diario de la calle, y le recordamos que, como tal, deberá obedecer todas las normas de tráfico. Por este motivo, deberá llevar siempre que sea posible ropa de colores claros en la oscuridad, para que pueda vérselo fácilmente, y evitar tapar los reflectores. Tenga cuidado durante su primer paseo en esta silla de ruedas. Acostúmbrase a su nueva silla. Haga una prueba del efecto que tendría cambiar el centro de gravedad sobre los movimientos de la silla de ruedas. Practique el uso de su silla de ruedas en terreno llano, así como cuesta arriba y cuesta abajo.

PRECAUCIÓN:

El propósito de los mecanismos de bloqueo de las ruedas no es servir de freno a la silla de ruedas. Su único cometido es asegurar que la silla no comience a rodar accidentalmente. Cuando se detenga en terreno no llano, deberá utilizar siempre los mecanismos de bloqueo de las ruedas. Active el mecanismo de bloqueo de ambas ruedas, de lo contrario la silla de ruedas podrá volcarse.

Los mecanismos de bloqueo de las ruedas no están diseñados para hacer las veces de los frenos. Utilice siempre los ascensores o las rampas. Si no los hay, podrá llegar a su destino con la asistencia de dos ayudantes, quienes deberán agarrar la silla por las piezas más seguras. Si su silla lleva tubos anti-vuelco, habrá que plegarlos. No habrá que levantar nunca la silla con su ocupante, sino empujarla tan sólo.

Antes de cada uso, deberá comprobarse lo siguiente:

- los ejes de desmontaje rápido de las ruedas traseras
- el velcro del asiento y el respaldo
- los neumáticos, la presión de los mismos y los mecanismos de bloqueo de las ruedas

Los mecanismos de bloqueo de las ruedas no funcionarán bien si la presión de los neumáticos es demasiado baja, o si el hueco entre los neumáticos y el mecanismo de bloqueo de cada rueda es demasiado grande.

El peso máximo del usuario es de 140 kg.

La silla de ruedas deberá utilizarse exclusivamente para llevar a una persona sola en el asiento. Si se sobrepasa este límite se estarán violando las normas de seguridad.

Se recomienda no sentarse en la silla de ruedas cuando se viaje en cualquier medio de transporte.

Tan sólo los asientos fijos y sus cinturones de seguridad ofrecerán la protección suficiente en situaciones peligrosas. Cuando el vehículo esté en movimiento, la silla de ruedas vacía deberá sujetarse con un método adecuado.

Antes de hacer cualquier ajuste a esta silla de ruedas, es importante leer la sección correspondiente de las instrucciones para el usuario.

Es posible que si existen baches o el suelo no es uniforme la silla vuelque, especialmente cuando se desplace cuesta arriba o cuesta abajo. Cuando se sube un escalón o se sube por una pendiente habrá que inclinar el cuerpo hacia delante.

Definición de propósitos:

La silla de ruedas manual ha sido diseñada para todos los usuarios que necesiten un nivel alto de soporte para sentarse erguidos durante cualquier período de tiempo. Dicho soporte se consigue mediante el respaldo moldeado y su acolchado, así como la capacidad de ajuste del conjunto del asiento (ángulo del asiento, ángulo del respaldo, fondo del asiento).

La silla puede utilizarse tanto en el interior como en el exterior, en superficies secas y relativamente planas. No deberá utilizarse cuando llueva con intensidad, o sobre superficies nevadas o resbaladizas.

Notas de seguridad

Atención: La superficie de la silla, las piezas del armazón y el la tapicería podrán alcanzar temperaturas superiores a los 41° C si se deja expuesta al sol durante un tiempo prolongado.

Componentes de la silla (4.1)

En SUNRISE MEDICAL se nos ha concedido la certificación ISO-9001, que confirma la calidad de nuestros productos en todas sus etapas, desde la investigación y el desarrollo hasta la producción. Este producto cumple con todos los requisitos estipulados en las directrices de la UE. Las opciones o accesorios que se muestran están disponibles a un coste adicional.


Sillas de ruedas:

1. Asas de empuje
2. Respaldo
3. Reposabrazos
4. Asiento
5. Reposapiés
6. Rueda delantera
7. Soporte de horquilla
8. Horquilla de rueda delantera
9. Eje de desmontaje rápido
10. Frenos
11. Aro de empuje
12. Rueda trasera



Manejo

El respaldo puede plegarse hacia delante para facilitar el transporte. En primer lugar, retire el pasador de seguridad. Sujete el respaldo de modo que no pueda caer inesperadamente y darle al botón de suelta (1). Después, pliegue el respaldo hacia delante.

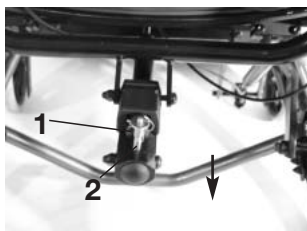

Precaución:

Riesgo de lesiones: el respaldo debe estar sujeto o fijo antes de soltarlo.

Para volver a poner el respaldo en la posición erguida, despléguelo y enganche el soporte.

Precaución:

Riesgo de lesiones: deberá asegurarse de que el respaldo se haya acoplado debidamente al soporte haciendo un chasquido.

La capacidad de frenado disminuirá si:

- la rodadura del neumático está desgastada
- la presión del neumático es demasiado baja
- las ruedas están mojadas
- los mecanismos de bloqueo de las ruedas no están ajustados correctamente

Los mecanismos de bloqueo de las ruedas no están diseñados para hacer las veces de los frenos. No aplique los mecanismos de bloqueo de las ruedas con la silla en movimiento. Utilice siempre los aros de empuje para frenar.

Asegúrese de que el hueco que queda entre el mecanismo de bloqueo y la rueda sea el indicado en las especificaciones (fig. 10.2). Para ajustarlo, afloje el tornillo (1) e introduzca el hueco adecuado. Vuelva a apretar el tornillo (véase la página sobre la presión).

PRECAUCIÓN:

Tras realizar cualquier ajuste a las ruedas traseras, compruebe el ajuste del freno y, si es necesario, vuelva a ajustarlo.

(6.2) Ejes de desmontaje rápido de la rueda trasera

Las ruedas traseras tienen un eje de desmontaje rápido. Las ruedas pueden retirarse y volver a colocarse sin necesidad de utilizar herramientas. Para quitar una rueda, basta con pulsar el botón de desmontaje rápido (1) y tirar de la rueda trasera hasta sacarla.




PRECAUCIÓN:

Para volver a poner la rueda, mantenga pulsado el botón de desmontaje rápido del eje. Suelte el botón para bloquear la rueda en su sitio. El botón deberá volver mediante un resorte a su posición original.

Frenos de tambor (7.13)

Los frenos de tambor permiten al ayudante frenar de forma cómoda y segura. Pueden aplicarse también con ayuda de una palanca de bloqueo (1). La palanca de bloqueo deberá hacer un chasquido audible al alcanzar la posición correcta. El funcionamiento de los frenos de tambor no depende de la presión del aire de los neumáticos. No se podrá empujar la silla con los frenos de tambor echados.

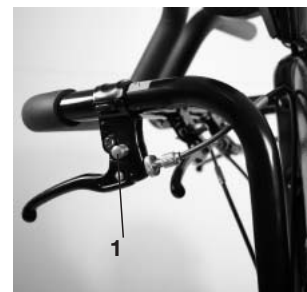

285

PRECAUCIÓN:

Tan sólo deberán ajustar los frenos de tambor los distribuidores autorizados.



Opciones – Tubos de cola

Tubos de cola (7.1)

Los tubos de cola se utilizan por la persona que empuja la silla, para ayudar a que la silla suba un escalón. Simplemente haga presión con el pie sobre estos tubos, para ayudar a que la silla suba un obstáculo o escalón.



Opciones – Frenos

Mecanismos de bloqueo de las ruedas (7.10.2)

La silla de ruedas viene equipada con dos mecanismos de bloqueo de las ruedas. Los mecanismos de bloqueo se aplican directamente a los neumáticos. Para aplicarlos, empuje las dos palancas de bloqueo contra los topes (fig. 10.1). Para soltar la rueda, tire hacia atrás de las palancas.



Reposapiés y enclavador

Reposapiés y enclavador (7.23.1)

El reposapiés puede girarse hacia fuera. Instale el reposapiés introduciéndolo con él apuntando hacia fuera. Luego gírelo hacia adentro hasta que el enclavador (1) se acople. Para desmontar el reposapiés, ayudándose de la palanca (2) gire el reposapiés hacia fuera y retírelo. Compruebe que el reposapiés quede bloqueado en la posición correcta.

PRECAUCIÓN:

Los reposapiés no deben utilizarse para levantar o transportar la silla con un ocupante.



1 2


Reposapiés estándar elevable (7.24.1)

Para elevarlo:

Retire la carga del reposapiés y suelte el volante de mano (1). Suba el reposapiés y ajústelo a la altura deseada. Sujételo a la altura que desee apretando el pomo.

Para bajarlo:

Retire la carga del reposapiés levantando la pantorrilla y suelte el enclavador con el volante de mano (1). Así, podrá girar el reposapiés hacia abajo. En cuanto haya alcanzado la posición deseada, asegure el enclavador con pomo. Puede ajustar infinitamente la longitud de la pantorrilla soltando los tornillos (2).

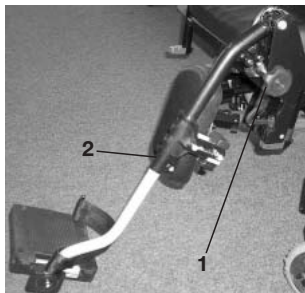

PRECAUCIÓN: Existe riesgo de pillarse los dedos.

Al elevar o bajar el reposapiés, no ponga los dedos en el mecanismo de ajuste entre las piezas móviles del reposapiés.

PRECAUCIÓN:

Los reposapiés no deben utilizarse para levantar o transportar la silla con un ocupante.

Reposacabezas


Reposacabezas (7.35)

El reposacabezas puede elevarse, desplazarse lateralmente y horizontalmente, tanto hacia delante como hacia atrás.

Ajuste de la altura: Tire del botón de desmontaje (1) y ajuste la altura deseada. Asegúrese de que el botón de desmontaje esté siempre bien acoplado.

Ajuste horizontal: Levante la palanca de suelta (2), colóquelo en la posición deseada y vuelva a tirar firmemente de la palanca.


Ajuste lateral: Al aflojar los tornillos (3) podrá moverse el reposacabezas hacia los lados. Vuelva a apretar los tornillos (véase la página sobre la presión).

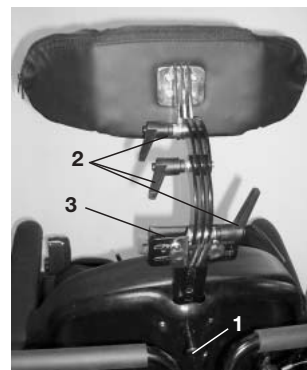

Ajuste de la altura del asiento

Ajuste de la altura del asiento (7.51.1.1)


Se puede ajustar la altura del asiento cambiando la posición de las ruedas delanteras y de las ruedas traseras (véase la tabla 1), así como mediante el conjunto del asiento. Para poder realizar este ajuste han de aflojarse los cuatro tornillos (1) y el conjunto del asiento debe atornillarse en la nueva posición (A, B). Tras realizar el ajuste, habrá que apretar los tornillos correctamente (véase la página la presión).

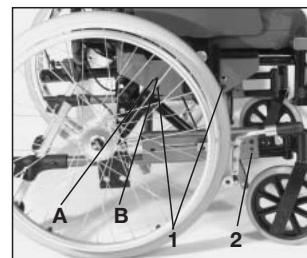

Altura del asiento	Instalación de las ruedas delanteras	Rueda delantera	Instalación de la rueda trasera	Rueda trasera	Conjunto del asiento
41 cm	1	6"	1	20"	A
43 cm	1	6"	1	20"	B
45 cm	1	8"	1	24"	A
45 cm	2	8"	2	16"	A
47 cm	1	8"	1	24"	B
47 cm	1	8"	4	16"	B
47,5 cm	2	8"	2	24"	A
49,5 cm	2	8"	2	24"	B
50 cm	3	8"	3	24"	A
52 cm	3	8"	3	24"	B

Cuña de abducción

Al aflojar el tornillo (1) podrá ajustarse la altura de la cuña de abducción, y al aflojar los tornillos (2, 3) podrá ajustarse el fondo o retirarse.

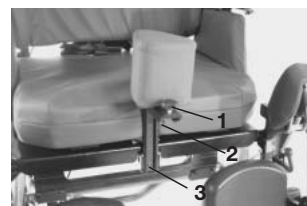

Plataformas reposapiés de ángulo ajustable

Plataformas reposapiés de ángulo ajustable (7.22)

La plataforma puede elevarse para facilitar el traslado del ocupante de la silla o a la silla.

Se puede ajustar para modificar el ángulo con el suelo. Afloje el tornillo (1) y ajústela en el ángulo deseado. A continuación apriete el tornillo.



Al aflojar el tornillo (1), la plataforma puede ajustarse tanto hacia delante como hacia atrás. Tras realizar cualquier ajuste, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados correctamente (véase la página sobre la presión). Asegúrese de respetar la separación mínima con el suelo (2,5 cm).



PRECAUCIÓN:

No deberá haber ningún peso sobre la plataforma a la hora de realizar el ajuste.

Se puede ajustar el fondo de las cintas taloneras. Para ello, afloje los tornillos (1) y empuje la cintas taloneras a la posición deseada. Tras hacer el ajuste, habrá que apretar todos los tornillos correctamente. Presionando la cintas taloneras contra el tubo del reposapiés, podrá ajustar también la altura.

Ampliación de la distancia entre los ejes

Ampliación de la distancia entre los ejes de las ruedas (7.56)

Cuanto mayor sea la distancia entre los ejes, menos posibilidades habrá de que la silla se vuelque. La rueda trasera se instala en la posición más retrasada para ampliar la distancia entre los ejes. Tras realizar cualquier ajuste, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados correctamente (véase la página sobre la presión).



PRECAUCIÓN:

Deberán ajustarse los mecanismos de bloqueo de las ruedas para que funcionen debidamente con la nueva posición.

Con la ampliación del armazón integral, pueden mejorarse la estabilidad de la silla de ruedas y su maniobrabilidad. Aflojando los tornillos (1) se podrá alargar el armazón. Tras realizar cualquier ajuste, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados correctamente (véase la página sobre el par de apriete).



PRECAUCIÓN:

El chasis no deberá hacerse más largo que el armazón del asiento.

Altura del respaldo

Respaldo Comfort (7.77.4)

El respaldo Comfort le permitirá permanecer sentado durante un tiempo prolongado con soporte lateral. Para retirarlo, tire de él hacia arriba y hacia delante. El cojín va sujeto con velcro, y también puede retirarse. La funda puede lavarse (véanse las instrucciones del cojín).



Altura ajustable del respaldo (7.77)

La altura del respaldo puede ajustarse en varias posiciones soltando los cuatro tornillos de fijación (1). Seguidamente, vuelva a apretar los tornillos de fijación (véase la página sobre la presión).

Soportes laterales (7.77.5)

El ángulo, el fondo y la altura de los soportes laterales pueden ajustarse, y también pueden apartarse o retirarse los soportes.

- Ajuste del fondo: Afloje el tornillo (1) y coloque el cojín en su nueva posición. Apriete el tornillo.



- Ajuste del ángulo: Empuje el soporte hacia arriba, colóquelo en el ángulo deseado y suéltelo. Se acoplará automáticamente con un chasquido. El soporte se aparta de esta manera.



- Ajuste de la altura: Afloje el tornillo (2) y coloque el soporte en la posición deseada. Si el ajuste

no es suficiente, también puede colocarse el soporte en una nueva posición en el soporte. A continuación apriete los tornillos.

Ángulo ajustable del respaldo (8°- 40°/50°) (7.79)

Tirando de la palanca (1), se suelta el respaldo y puede colocarse en la posición deseada. Al soltarlo, el respaldo queda fijado automáticamente en la nueva posición.



PRECAUCIÓN:

El respaldo de ángulo ajustable sólo puede utilizarse con tubos anti-vuelco. El hueco entre los tubos anti-vuelco y el suelo de ser de 2,5 cm como máximo.

PRECAUCIÓN:

Para asegurar el correcto funcionamiento de los cables, éstos no deberán estar tirantes nunca.

PRECAUCIÓN:

Existe riesgo de pillarse los dedos al ajustar el respaldo.

PRECAUCIÓN:


No ajuste el respaldo cuando la silla de ruedas esté en una pendiente.

Protector lateral de altura ajustable

Protector lateral de altura ajustable (7.81.1)

La altura del apoyabrazos debe ajustarse de la siguiente manera. Tire del botón (1) y ajuste el apoyabrazos (2) hasta alcanzar la altura deseada. Compruebe siempre que los apoyabrazos estén acoplados correctamente.

Podrá ajustar la profundidad del apoyabrazos tras soltar el pomo (3). Después, apriete el pomo.

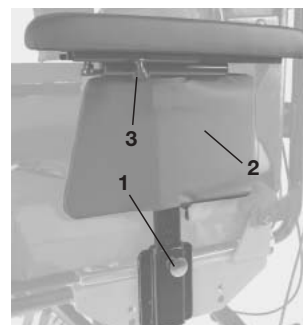

PRECAUCIÓN:

Ni los protectores laterales ni los apoyabrazos deberán ser utilizados para levantar o transportar la silla.

Opciones - Hemiplejía

Apoyabrazos para pacientes con hemiplejía

En el caso del apoyabrazos para pacientes hemipléjicos pueden ajustarse tanto la longitud como el ángulo. Puede ajustar la longitud empujando el apoyabrazos tras haber aflojado los dos tornillos giratorios (1). Para ajustar el ángulo, mantenga pulsado el botón 2, gire el apoyabrazos hasta la altura deseada y, a continuación, suelte el botón.



Asas de empuje ajustables

Asas de empuje ajustables (7.90)

Estas asas están sujetas con pasadores para evitar que se salgan por accidente. Abrir el pomo (1) hace posible ajustar la altura de las asas de empuje (2) para ajustarse a sus necesidades particulares. Después, apriete el pomo.



49

PRECAUCIÓN:

El pomo deberá estar siempre apretado para evitar que las asas de empuje se aflojen durante el transporte.

PRECAUCIÓN:

No saque el asa de empuje más allá del punto en que los tornillos de ajuste se agarren a las ranuras.

Profundidad del asiento (7.102.2)

Tras aflojar los tornillos (1), podrá ajustar la profundidad del asiento a la posición que desee. Seguidamente, vuelva a apretar los tornillos (véase la página sobre el par de apriete).



PRECAUCIÓN:

No deberá excederse el fondo máximo del asiento (véanse las marcas y el tope).

Ajuste del ancho del asiento (7.105.1)

Podrá ampliar el ancho del asiento de la silla de ruedas retirando la tapicería (1).

Ángulo ajustable del asiento (2°-20°) (7.79)

Tirando de la palanca, se suelta el asiento y puede colocarse en la posición deseada. Al soltarlo, el asiento queda fijado automáticamente en la nueva posición.

PRECAUCIÓN:

El asiento de ángulo ajustable sólo puede utilizarse con tubos anti-vuelco.

El hueco entre los tubos anti-vuelco y el suelo de ser de 2,5 cm como máximo.

PRECAUCIÓN:

Para asegurar el correcto funcionamiento de los cables, éstos no deberán estar tirantes nunca.

PRECAUCIÓN:

Existe riesgo de pillarse los dedos al ajustar el asiento.

PRECAUCIÓN:

No ajuste el ángulo del asiento cuando la silla de ruedas esté en una pendiente.

Opciones – Cinturón

Cinturón (7.92.1)


El cinturón de seguridad es un cinturón que ciñe la cadera y mejora la seguridad de la silla de ruedas.



Opciones - Tubos anti-vuelco

Tubos anti-vuelco (7.93.1)

Los tubos anti-vuelco (1) proporcionan seguridad adicional para usuarios con poca experiencia cuando aún están aprendiendo a manejar su silla de ruedas. Los tubos anti-vuelco (1) evitan que la silla de ruedas se vuelque hacia atrás. Al tirar del enclavador (2), podrá ajustarse la altura del tubo anti-vuelco. Debería quedar un hueco de 3 a 5 cm entre los tubos y el suelo. Para subir o bajar un escalón (por ejemplo, el bordillo) los tubos anti-vuelco deberán estar elevados para evitar que toquen el suelo.

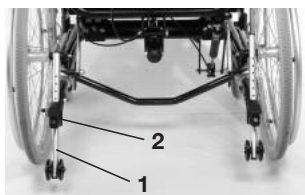

Opciones – Soporte de bastones

Soporte de bastones (7.110)

Permite transportar los bastones directamente en la propia silla de ruedas. Tiene una cinta de Velcro (1) para sujetar los bastones o cualquier otra ayuda.

ATENCIÓN:

No trate nunca de utilizar o coger el bastón mientras esté en movimiento.



306

Asiento Comfort

Asiento Comfort (7.101.2)

El asiento Comfort le permite estar sentado durante un período prolongado, gracias a la base con forma anatómica del asiento y los cojines anatómicos. El cojín va sujeto con velcro, y también puede retirarse. La funda puede lavarse (véanse las instrucciones del cojín).



Opciones – Mesa

Mesa (7.111)

La mesa proporciona una superficie plana para realizar distintas actividades. Antes de colocar la mesa, ésta debe ser ajustada a la anchura del asiento por un distribuidor autorizado. El usuario debe estar sentado durante las pruebas.



307

Cubiertas y montaje

Neumáticos y montaje (8.1)

Asegúrese siempre de mantener la presión correcta de los neumáticos, puesto que puede afectar al funcionamiento de la silla de ruedas. Si la presión de los neumáticos es demasiado baja, aumentará la resistencia al rodaje, con lo que hará falta hacer un mayor esfuerzo para hacer avanzar la silla. Una presión demasiado baja de los neumáticos tiene además un efecto negativo sobre la maniobrabilidad. Si la presión de los neumáticos es demasiado alta, podrían reventar. **La presión correcta de un neumático dado aparece indicada en su superficie.**

Los neumáticos se montan de la misma forma que los neumáticos de una bicicleta. Antes de instalar una nueva cámara, debe asegurarse de que tanto la base de la llanta como el interior de la cubierta estén exentas de objetos extraños. Compruebe la presión después de montar o reparar un neumático. Es de importancia crítica para su seguridad y para el buen funcionamiento de la silla que se compruebe la presión y el estado de los neumáticos de forma periódica.

Solución de problemas

La silla se desvía hacia uno de los lados (9.1)

- Compruebe la presión de los neumáticos
- Compruebe que las ruedas giran libremente (cojinetes, eje)
- Compruebe el ángulo de las ruedas delanteras.
- Compruebe que ambas ruedas delanteras estén en contacto con el suelo.

Las ruedas delanteras empiezan a vibrar (9.2)

- Compruebe el ángulo de las ruedas delanteras.
- Compruebe que todos los tornillos estén bien apretados. Apriételos si fuera necesario (véase la página sobre la presión).
- Compruebe que ambas ruedas delanteras estén en contacto con el suelo.

La silla chirría y traquetea (9.6)

- Compruebe que todos los tornillos estén bien apretados. Apriételos si fuera necesario (véase la página sobre la presión).
- Aplique una pequeña cantidad de lubricante a las piezas móviles.

Cuidado y mantenimiento

Mantenimiento (9.9.1)

- Compruebe la presión de los neumáticos cada cuatro semanas aproximadamente. Compruebe los neumáticos para ver si están desgastados o dañados.
- Compruebe los frenos aproximadamente cada cuatro semanas con el fin de comprobar que funcionan correctamente y que no están duros o agarrotados.
- Los neumáticos se montan de la misma forma que los neumáticos de una bicicleta.
- Todas las uniones que son críticas para su seguridad durante el uso de la silla llevan tuercas de seguridad. Compruébelas cada tres meses para asegurar que los tornillos estén bien apretados (ver página sobre la presión).
- Las tuercas de seguridad sólo deben ser utilizadas una vez, debiendo ser sustituidas después de múltiples usos.
- Utilice sólo agentes de limpieza suaves de uso doméstico cuando su silla de ruedas esté sucia. Utilice sólo jabón y agua para limpiar la tapicería del asiento.
- Si su silla de ruedas se moja, séquela después de utilizarla.
- Debe aplicarse una pequeña cantidad de aceite a los ejes de desmontaje rápido aproximadamente cada ocho semanas.

Dependiendo de la frecuencia y tipo de uso, recomendamos que lleve la silla de ruedas a nuestro distribuidor autorizado cada seis meses para que sea inspeccionada por personal cualificado.

PRECAUCIÓN:

La arena y el agua del mar (o la sal durante el invierno) pueden dañar los rodamientos de las ruedas delanteras y traseras. Limpie la silla cuidadosamente después de haber estado expuesta a dichos agentes.

Higiene para sillas de segunda mano:

Si la silla ha pertenecido anteriormente a otra persona, deberá prepararla con cuidado, y limpiarla y aplicar un desinfectante en aerosol a todas las superficies que puedan entrar en contacto con el usuario.

Preste atención a las instrucciones del fabricante del desinfectante que vaya a utilizar.

Por lo general, no se puede garantizar la desinfección total de las costuras. Por lo tanto, recomendamos que deseche la tela del asiento y la del respaldo en caso de contaminación microbacteriana con agentes activos, según lo estipula la ley §6 de protección contra infecciones.

Sellador de roscas de tornillos

Sellador de roscas de tornillos (9.9.1)

Debe de aplicar siempre sellador de roscas en los tornillos marcados con color gris, siempre que se realicen operaciones de ajuste, durante las cuales dichos tornillos son aflojados.

Amortiguadores y cables

Topes y cables (9.9.2)

PRECAUCION: Para evitar que su funciones resulten afectadas, debe de asegurar que los cables no estén nunca totalmente tensados.

Problema: Juego en la palanca

Solución: Afloje el tornillo de ajuste (1) hasta que la palanca (2) no tenga juego alguno.

Ajuste del ángulo del asiento

Problema: El asiento se desplaza fuera de su posición, sin utilizar el mecanismo de liberación del tope.

Causa: Los cables Bowden (1) del tope están demasiado tensados.

Solución: Ajuste la tensión de los cables Bowden por medio del tornillo de ajuste hasta que el desplazamiento de la cabeza de liberación (2) del cable sea de 10 mm.

PRECAUCION: Ambos cables deben de tener el mismo ajuste

Problema: No se puede regular el ángulo del asiento.

Causa: Los cables Bowden están demasiado flojos.

Solución: Ajuste los cables Bowden con el tornillo de ajuste hasta que el desplazamiento de la cabeza de liberación (2) del cable sea de 10 mm.

Ajuste del centro de gravedad

Problema: El asiento no puede ser llevado hacia delante y hacia atrás (en uno de los lados o en ambos lados).

Causa: El ajuste de los cables no es correcto.

Solución: Compruebe que el alojamiento del bulón entallado está en la posición correcta. Para ello, suelte la tuerca de bloqueo y desmonte todo el mecanismo de entalla. Luego compruebe la longitud de los cables Bowden. Al hacer esto, asegure que el cable no forma bucles. El bulón entallado debe de sobresalir del alojamiento aproximadamente 9 mm. Además el bulón entallado debe de estar enrasado con el interior del alojamiento del carro del asiento.

PRECAUCION: Proteja el cable Bowden contra los daños (deformación). Si se deforma, debe de ser sustituido.

Datos Técnicos (10)

Medidas de la silla de ruedas

Longitud total: 128 cm

Anchura total: ancho del asiento + 23 cm

- Las ruedas con freno de tambor aumentan el ancho de la silla en 2 cm.

Peso en kg:

- Peso total: > 38 kg
- Peso para transporte (peso sin las piezas extraíbles): > 22 kg (para transportar la silla, levántela por el armazón del asiento)
- Reposapiés (par): 4,8 kg
- Protectores laterales (par): 2,4 kg
- Ruedas traseras (par): 4 kg

Carga máxima:

Certificada para cargas de hasta 140 kg

Etiqueta/garantía

Etiqueta de identificación (11.2)

La etiqueta de identificación se encuentra o en la cruceta o en el armazón, y también en la contraportada del manual de usuario. La etiqueta de identificación indica la designación exacta del modelo, así como otras especificaciones técnicas. Rogamos nos facilite los siguientes datos cuando vaya a pedir piezas de repuesto o hacer una reclamación:

- Número de serie
- Número de pedido
- Mes/año




Garantía

Nos complace que haya elegido un producto de Sunrise Medical. Le ofrecemos un periodo de 2 años de conformidad de producto. No nos hacemos responsables de ningún daño ocasionado por instalaciones o reparaciones inadecuadas o poco profesionales, por negligencia, por desgaste o por cambios al conjunto de la silla de ruedas efectuados por el usuario o por terceros. En tales casos, esta garantía se considerará invalidada.

No se pueden devolver sillas fabricadas a medida.

Presión (12.1.1)

La presión necesaria para apretar los tornillos es la siguiente

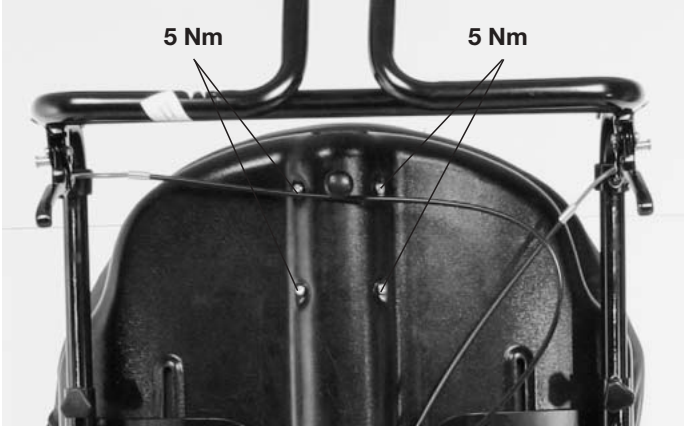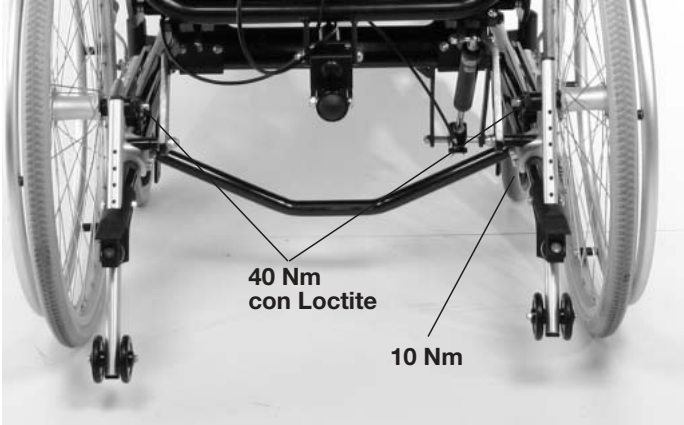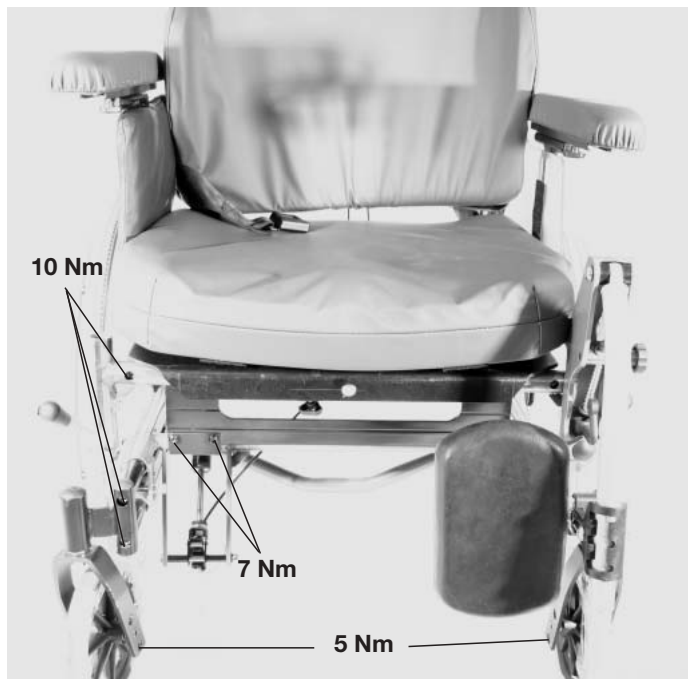

Presión (12.1)
La presión para todos los demás tornillos es 7 Nm.