

Orto - Medic

www.ortomedic.cl


Silla de Baño y Tina

sb

SB-2

showerbuddy™

Nueva

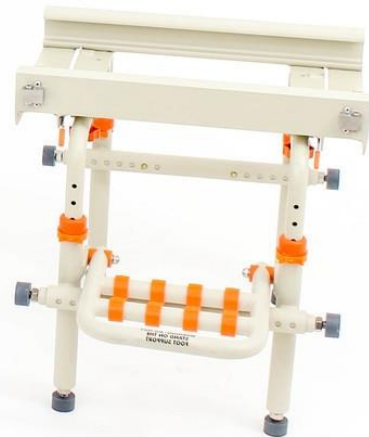

Características del producto.

La Silla de baño y tina con sistema de transferencia convertirá su bañera existente en un baño accesible que le permite disfrutar de la ducha nuevamente sin el costo excesivo, el retraso y/o el estrés de una remodelación completa del baño.

Alivia el levantamiento pesado y las transferencias múltiples para la ducha. Esta silla está separada en tres secciones (base con ruedas, puente o riel de acople y base para la tina. La base con ruedas permite al paciente trasladarse fácilmente y posicionarse sobre la mayoría de los inodoros. La base con ruedas se conecta a un puente y luego a la base de la bañera, lo que permite que la silla se deslice

sobre la bañera. Una vez sobre la bañera, el puente se desconecta permitiendo que la cortina se cierre.

El sistema TubBuddy SB2 está hecho de aluminio que no se oxidará al estar en contacto con el agua.

Ajuste de altura en la base rodante y la base de la bañera, lo que permite su uso en una variedad de tinas.

Cabe sobre la mayoría de los inodoros, permitiendo una alternativa al uso del inodoro.

Los tamaños de puente personalizados están disponibles, lo que permite su uso en una variedad de tamaños de baño.

Beneficios del producto.

Tres cuerpos + asiento

Este Producto se divide específicamente en cuatro secciones:



Riel de acople



Asiento

La base con ruedas


Base para tina

Se ensamblan para que el asiento se deslice a través del riel y el usuario pueda ingresar a la tina.



Brazos abatibles.

Los brazos se abaten hacia arriba o se pueden desmontar con el fin de liberar el acceso lateral, para una transferencia más cómoda. Cuenta además con un sistema de bloqueo para un apoyo seguro.

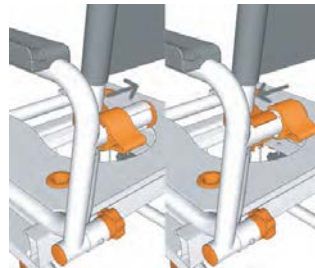

4 Ruedas pequeñas.

Sus cuatro ruedas de 5 pulgadas facilitan el acceso por pasillos estrechos o puertas pequeñas. Con solo 56 cm de ancho y 90 cm de largo se hace ideal para lugares reducidos como por ejemplo un departamento. Su separación de patas traseras es de 36 cm interior para acceder al wc.



Balde con tapa.

A demás esta silla dispone de un balde tipo chata permitiendo utilizar la silla como un inodoro portátil que puede ser usado en la comodidad de una habitación sin necesidad de ir al baño.






Cinturón de seguridad y respaldo de malla.

Para dar seguridad en el traslado posee un cinturón de tórax fijado al marco del respaldo y con broche plástico para una segura y fácil fijación. Además destacamos la malla del respaldo aireada para la evitar acumulación de líquidos, siendo de mayor adherencia para evitar deslizamiento.




Altura graduable.

Para poder anclar el riel a ambas bases (la que va en la tina y la con ruedas), es que dichas bases se ajustan en altura para un acople perfecto y seguro. Esto debido a que muchas tinas son más altas que el piso.

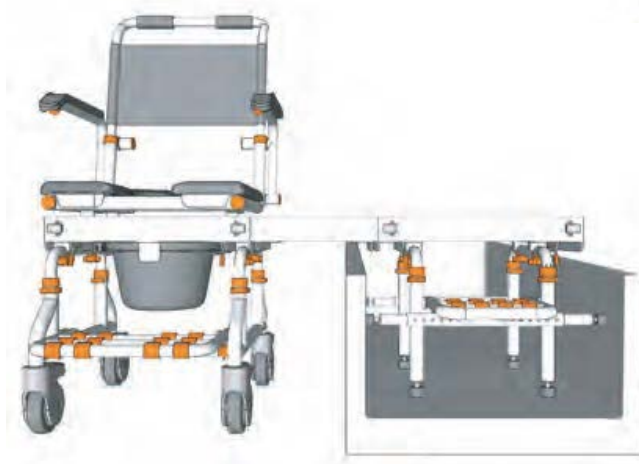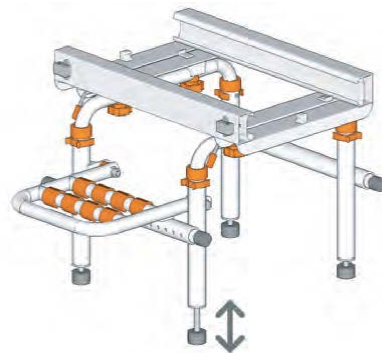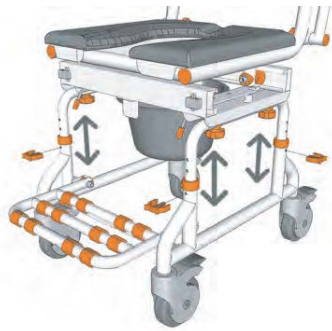

Especificaciones Técnicas

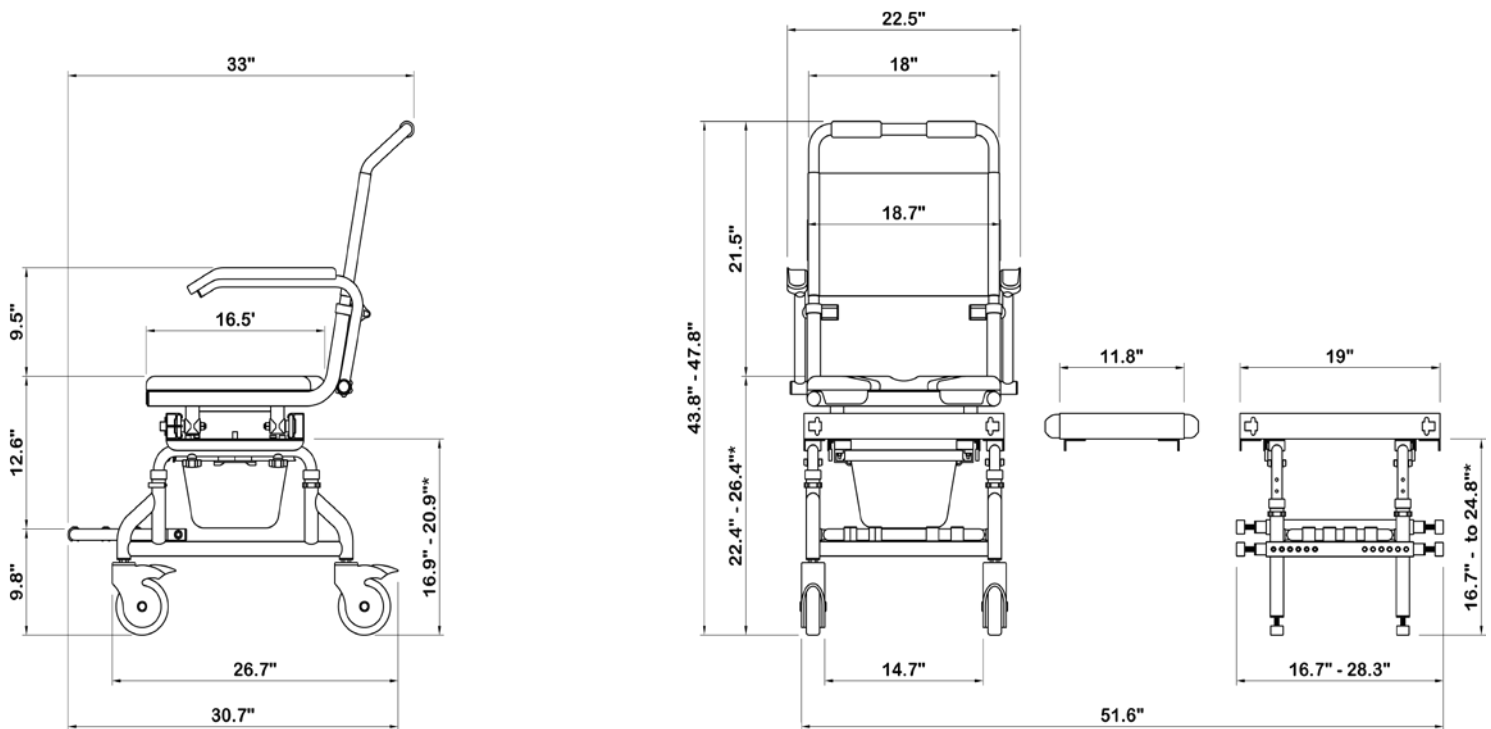

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	PESO Y DIMENSIONES
Base de la bañera (en la parte inferior de las patas)Ancho x Largo	465mm L x 335mm W (18.3" x 13.2")
Límite de peso	350 lb (160kg)
Base Rodante Ancho y Profundidad	19.3" x 26.7" (490mm x 680mm)
Base Rodante Incluido apoyapies	19.3" x 30.7" (490mm x 780mm)
Ancho desde el exterior de apoyabrazos	22.5" (570mm)
Ancho desde el interior de apoyabrazos	18.7" (475mm)
Ancho entre las ruedas delanteras	15.7" (400mm)
Ancho de Respaldo	18" (460mm)
Altura de respaldo desde el cojín	17" (440mm)
Altura Máxima del Inodoro	19.4" (495mm)
Largo del riel de acolpe	11.8" (300mm)
Ancho y profundidad del cojín	17.7" x 16.5" (450mm x 420mm)
Altura desde el piso al asiento (ajustable)	22.4" - 26.4" (570mm - 670mm)
Abertura del cojín (Ancho y Largo)	6.8" x 13" (175mm x 335mm)
Base de bañera (Ancho x Largo)	13.2" x 18.3" (335mm x 465mm)
Base de bañera (con estabilizadores)	16.7" - 28.3"(425mm - 720mm)

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 - 22698089

Stgo. - Chile