

# Cojín Antiescaras Sedens 500



Orto Medic Ltda.

**APEX**

El Sedens 500 resulta ideal para la prevención (riesgo muy alto) y el tratamiento de las úlceras por presión de grado III y IV en la zona del sacro en personas con movilidad reducida. Disponible en tres medidas: 43 x 43 cm, 41 x 42 cm y 46 x 46 cm.

Está compuesto de cuatro celdas de aire de presión alternante sobre una base de espuma. La alternancia se obtiene mediante un compresor compacto y autónomo (dispone de una batería con hasta 12 horas de duración). El compresor cuenta con un menú en el que se puede fijar: el modo (alternante o estático), la duración del ciclo (10, 15 ó 20 min), el confort del paciente (de 1 a 5) y dos alarmas silenciabes (baja presión y batería baja).

Incorpora una funda bi-elástica que reduce la fricción. Es resistente al agua y fácil de lavar.



Compuesto de cuatro celdas de aire de presión alternante sobre una base.



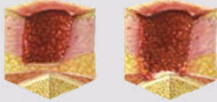
Batería de litio de larga duración que permite utilizarlo con una autonomía de hasta 12 horas.



Compresor compacto, de fácil uso y silencioso.



Funda PU bi-elástica, transpirable e impermeable al agua.

Eficacia Terapéutica	Sedens 500
Alivio de Presión	Medio / Alto
Gestión del Microclima	Muy alta
Reducción de la Fricción	Alta
Riesgo de Úlceras	Alto y Muy Alto
	Grado 3 y 4
Tratamiento UPP	
Peso máximo del paciente	120 kg

Descripción de Producto	Sedens 500 43 x 43	Sedens 500 41 x 42	Sedens 500 46 x 46
Referencia	0101021	0101021-41	0101021-46

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	46 x 44 x 13,5 cm	52,1 x 49,7 x 51,5 cm	52,1 x 49,7 x 51,5 cm
Peso total de la caja	3,5 kg	3,5 Kg	3,7 Kg

Especificaciones de producto	Sedens 500 43 x 43	Sedens 500 41 x 42	Sedens 500 46 x 46
Dimensiones (largo x ancho x alto)	Cojín: 43 x 43 x 10 cm	Cojín: 41 x 42 x 10 cm	Cojín: 46 x 46 x 10 cm
	Compresor: 25 x 12,5 x 5,7 cm	Compresor: 25 x 12,5 x 5,7 cm	Compresor: 25 x 12,5 x 5,7 cm
Peso del producto	Cojín: 1,44 kg	Cojín: 2 kg	Cojín: 2,2 kg
	Compresor: 960 gr	Compresor: 960 gr	Compresor: 960 gr
Material del cojín	Nylon PU	Nylon PU	Nylon PU
Material de la funda	Nylon PU bi-elástica	Nylon PU bi-elástica	Nylon PU bi-elástica
Voltaje	AC 100V-240V, 50/60 HzDC 12V, 1,25A con adaptador	AC 100V-240V, 50/60 HzDC 12V, 1,25A con adaptador	AC 100V-240V, 50/60 HzDC 12V, 1,25A con adaptador
Máxima salida de aire	1,8 l/min	1,8 l/min	1,8 l/min
Niveles de confort	5	5	5
Ciclo temporal	10, 15 o 20 min	10, 15 o 20 min	10, 15 o 20 min
Terapia	Alternante	Alternante	Alternante
Funciones	Estática, botón de encendido y apagado	Estática, botón de encendido y apagado	Estática, botón de encendido y apagado
Peso máximo soportado	120 kg	120 kg	120 kg
Certificado	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2	EN 597-1 & EN 597-2
Garantía	2 años. Batería 6 meses	2 años. Batería 6 meses	2 años. Batería 6 meses

Orto Medic Ltda.

[www.ortomedic.cl](http://www.ortomedic.cl)  
Julio Prado 1665, Ñuñoa Stgo  
22698090-22698089

**APEX**