

# Instructivo Coche Infantil Modelo Paraguas



## **Instrucciones:**

### **Paso 1**

Al sacar el coche del embalaje, usted recibirá el coche en esta posición.



## Paso 2

Desenganchar el seguro plástico lateral, para poder extender el coche.



Enganchado



Desenganchar

## Paso 3

Extienda el coche y fíjelo con los bloqueadores de tensión que se encuentran detrás del respaldo y bajo el asiento.



Bloqueador bajo asiento



Bloqueador tras respaldo

## Paso 4

Para montar los apoyapies se deben anclar la base de los apoyapies sobre uno de los ejes de anclaje (negros) y presionar el seguro para enganchar el eje, de esta forma evitar que se desmonte la base apoyapies.



Ejes de anclaje negros



Seguro de enganche de ejes

**PRECAUCIÓN:** Sacar apoyapies antes de plegar.

## Especificaciones Técnicas:

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 4
Armazón	Plegable	Plegable	Plegable	Plegable
Anchura de asiento	32 cm	36 cm	40 cm	40 cm
Profundidad de asiento	26 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Altura de empuñadura al suelo	99 cm	101 cm	102 cm	105 cm
Altura de respaldo	51 cm	56 cm	60 cm	80 cm
Reclinación de respaldo	100 a 120 °	100 a 115 °	90 a 105 °	90 a 105 °
Longitud de pierna:	26 a 31 cm	25 a 32 cm	28 a 35 cm	37 a 44 cm
Anchura total	47 cm	55 cm	57 cm	57 cm
Longitud	63 cm	72 cm	73 cm	72 cm
Crecimiento en profundidad	n/a	n/a	n/a	n/a
Crecimiento en anchura	n/a	n/a	n/a	n/a
Peso máximo de usuario	25 kg	30 kg	40 kg	40 kg
Peso del producto	8 kg	8,5 kg	10 kg	10,5 kg
Color de armazón	Gris plata	Gris plata	Gris plata	Gris plata
Ruedas traseras	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Ruedas delanteras	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile