

## Compresor Nebulizador

*“Tigger-Neb” Mini Plus*



### **Características del producto.**

Presentamos el NUEVO “TriggerNeb” Mini-Plus. A diferencia de los nebulizadores tradicionales como el Mini Plus, este nuevo sistema permite controlar la nebulización a través de un gatillo para que la absorción del medicamento se aproveche al máximo.

Cuenta con un compresor de pistón con un diseño ultra compacto, que lo convierte en un producto sumamente portátil; con un peso muy ligero, que no supera los 1.5 Kg.

En funcionamiento podemos destacar su eficiencia y su bajo nivel de ruido; soportando una presión máxima de 35 psi y un flujo de aire de 5 a 6 litros por minuto.

La diferencia al Mini-Plus (modelo tradicional) se encuentra en el dosificador que cuenta con un gatillo que se acciona fácilmente. El recipiente donde se aloja el medicamento viene graduado para colocar la dosis indicada por el médico a consumir.



## ¿Cómo funciona el nebulizador reutilizable Trigger-Neb ?


El uso para tranquilidad de los usuarios es exactamente igual a Mini-Plus tradicional o nebulizadores tradicionales, la diferencia como lo expresamos se encuentra en el activador de gatillo que nos permite dos modos de uso (intermitente o continuo).

- Modo Intermitente (Disparador): Este modo le permite utilizar el gatillo para detener / iniciar el tratamiento y reducir el desperdicio de medicamentos. Para usar el modo intermitente, simplemente presione el gatillo para comenzar el tratamiento o suelte el gatillo para detener el tratamiento.



- Modo Continuo: Este modo es como el modelo tradicional, sin detención de la nebulización. Para activarlo, boquee el gatillo presionando la pestaña del gatillo hacia abajo, para comenzar el tratamiento.

Pestaña del gatillo

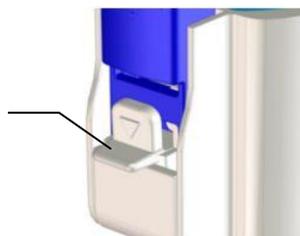

TriggerNeb Mini Plus dispone de un kit de nebulizador reutilizable, para un uso de hasta 6 meses.

Un producto ideal para uso domestico y a un precio muy conveniente.

## Especificaciones Técnicas

El producto se compone de un Compresor-nebulizador (con filtros de aire) + Kit TriggerNeb (botella de nebulizador reutilizable, boquilla, mascarillas) + tubo de suministro y manual de instrucciones.



### Especificaciones

<b>Método de Nebulización</b>	<b>Compresor de pistón</b>
<b>Requerimiento eléctrico</b>	<b>220 V. 60Hz</b>
<b>Tamaño de las partículas</b>	<b>Menos de 5 micras</b>
<b>Presión máxima</b>	<b>35 PSI.</b>
<b>Presión de funcionamiento</b>	<b>16 PSI.</b>
<b>Dimensiones</b>	<b>14 cm x 19 cm x 10 cm</b>
<b>Rango de T° y H° de funcionamiento</b>	<b>10° – 40° C. / 30%-95% HR</b>
<b>Peso del producto</b>	<b>1.45 Kg</b>
<b>Garantía</b>	<b>5 años.</b>

**[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)**

**Julio Prado # 1665**

**Fono: 2698090 – 2698089**

**Stgo. - Chile**